



Межрегиональная общественная организация  
Военно-техническое общество

## ТЭТ-2/2. Tактическая эвакуационная тележка

Техника → Спецтехника → Прочее

Объявление доступно по ссылке: <https://www.voentex.ru/offer/53>



### Контактные данные

**Автор объявления:** voentex

**Email:** voentex@voentex.ru

### Технические характеристики

**Тип двигателя:** бензин

**Описание:**

Предназначена для эвакуации и перевозки раненных с переднего края, к санитарному автомобилю или к автомобилю скорой помощи.

Имеет варианты использования:

1. Доставка к месту применения в виде «ранца».
2. К месту эвакуации раненного можно перевозить груз и снаряжение «Тележка» до 250 кг.
3. Вариант раскладывания и перевозки «коляска» в полусидящем положении лицом к бойцу вывозящему раненного.
4. Вариант раскладывания и перевозки в полусидящем положении спиной к бойцу вывозящему раненного, по принципу «тачанки», путём поворота дышла на 180 градусов, при этом

эвакуируемый боец может контролировать местность.

5. В варианте «тачанки» возможно через Т-образное дышло перекинуть ремень продев через шею и руку тянущего бойца по аналогии с «бурлаком» высвободить обе руки и использовать оружие.

6. При тяжёлых ранениях; живота, грудной клетки и позвоночника транспортировка раненного производится в горизонте, для этого нужно разложить тележку в горизонтальное положение «носилки» и произвести эвакуацию.

7. При эвакуации раненного из под интенсивного обстрела Тележка раскладывается в горизонт, дышло разворачивается также в горизонтальное положение, а также можно использовать верёвку накинув петлёй на дышло.

8. Переносить раненого через препятствия; рвы, окопы, брод и т.д. по типу «носилки» двумя человеками нагрузка до 130 кг. или четырьмя человеками вес груза до 160 кг.

9. Если есть необходимость на какое-то время оставить или спрятать раненного в горизонтальном положении, для этого необходимо откинуть специальную поддерживающую ножку в районе дышла.

Габариты в сложенном положении (без колёс):

Длина 104 см.

Ширина 84 см.

Габариты в разложенном положении (без колёс):

Длина 188 см. Длина с дышлом 233 см.

Ширина 84 см. Вес (без колёс) 14 кг.

Вес колёс (в зависимости от производителя): 2 шт. 5-7 кг.

Устройство рассчитано на нагрузку:

1. При перевозке 250 кг. распределённого веса.

2. При переноске раненого по типу носилок двумя человеками максимальный вес нагрузки до 130 кг.

3. При переноске раненого четырьмя человеками с захватом не менее 15 см. от края, максимальный вес нагрузки до 160 кг.

**Цена:** по запросу

## Фотографии











